

2019年4月12日

診療科長 医局長  
病棟医長 外来医長  
中央診療施設副部長 殿  
看護部長 看護師長  
事務部長

検査部 サテライト検査室

日頃より採血業務へのご協力ありがとうございます。  
2019年5月7日より、中央採血室の採血管準備装置が新機器に更新されます。  
それに伴い、中央採血室で準備している翌平日分の病棟採血管の梱包方法や採血管ラベルが変更になりますのでお知らせ致します。

- ① 病棟採血管梱包方法の変更：検査部回報 No.19
- ② 採血管ラベルの変更：検査部回報 No.20

## 検査部回報No. 20

### 採血管ラベル変更に関するお知らせ

中央採血室の採血管準備装置の機器更新により、中央採血室から出力される採血管のラベルがRFID (Radio Frequency Identification) 対応ラベル (IC チップ付き検体ラベル) に変更になります。

現行は白色ラベルですが、**RFID 対応ラベルはピンク色ラベル**になります。  
各病棟や外来で出力されるものは、これまで通り白色ラベルです。



左：白ラベル

右：ピンクラベル (RFID)

## [RFID ラベル運用に関する注意事項]

### ◇ **貼り直し厳禁!!**

ピンク色ラベルには IC チップが内蔵されています。剥がして別の採血管に貼り付けると **IC チップが破損**してしまうため、貼り直しは絶対にしないで下さい。

また、ピンク色ラベルの上から白色ラベルを重ねて貼る事も絶対にしないで下さい。

採り直しをする場合は**白色ラベルを再発行し、新しい採血管に貼って採血して下さい**。その際、ピンク色ラベルが貼られていた採血管は、破棄するか採り直した検体と輪ゴムで括って提出して下さい。

### ◇ **磁気を近づけない!!**

強力な磁気が近づくと IC チップが破損する場合がありますので、磁気には近づけないで下さい。

### ◇ **ラベルに対して強い力をかけない!!**

IC チップの破損を避けるため、ぶついたり落としたりしないよう注意して下さい。

**2019年5月7日（火）採血分より、変更になります。**

よろしくお願い致します。

上記についてのお問い合わせは、サテライト検査室（内線7409）までお願い致します。