

2020年 1月 29日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 微生物検査室

検査部回報No. 1

血液培養ボトルのラベル貼付方法の変更

血液培養装置の機器更新に伴い、ラベル貼付の位置が下記の通り、変更となります。なお、現在使用している血液培養ボトルはそのまま使用できます。


記

運用開始日：2020年2月3日(月)依頼分より

現行機器	新機器
BacT/ALERT 3D (バイオメリュウ・ジャパン株式会社)	BacT/ALERT VIRTUO (バイオメリュウ・ジャパン株式会社)

①高さはこのライン
に沿って貼る

②黒縦線に沿って貼る

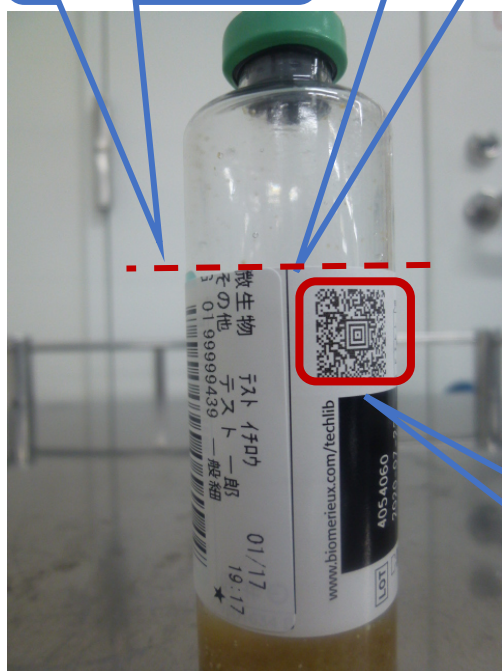

ラベル貼付の手順

写真に示すように依頼ラベルの左側を

①の高さに合わせる。

ラベル上側は②の黒線に合わせる。

二次元バーコード上に貼らない。

③二次元バーコードが
隠れないようにする

上記についてのお問い合わせは、検査部 微生物検査室（内線7413）までお願い致します。