

2017年9月19日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長
看護部長 看護師長
事務部長

殿

検査部 サテライト検査室

検査部回報 No.30

グリコアルブミン院内測定開始のお知らせ

現在、外注検査にて測定しておりますグリコアルブミン（GA）
を下記期日より院内測定開始いたします。

基準範囲は変更になります。


記

変 更 日：2017年10月18日（水）受付分より

検 査 項 目：グリコアルブミン

旧測定方法	酵素法	新測定方法	酵素法
旧分析機器名	自動分析装置(JCA-BM8000 シリーズ)日本電子株式会社	新分析機器名	自動分析装置(JCA-BM6070) 日本電子株式会社
旧試薬名	ルシカ GA-L (製造元) 旭化成ファーマ株式会社	新試薬名	ルシカ GA-L (製造元) 旭化成ファーマ株式会社

検査項目名	基準範囲(単位)	新基準範囲(単位)
グリコアルブミン (GA)	12.4~16.3(%) SRL 自社基準	11~16(%)

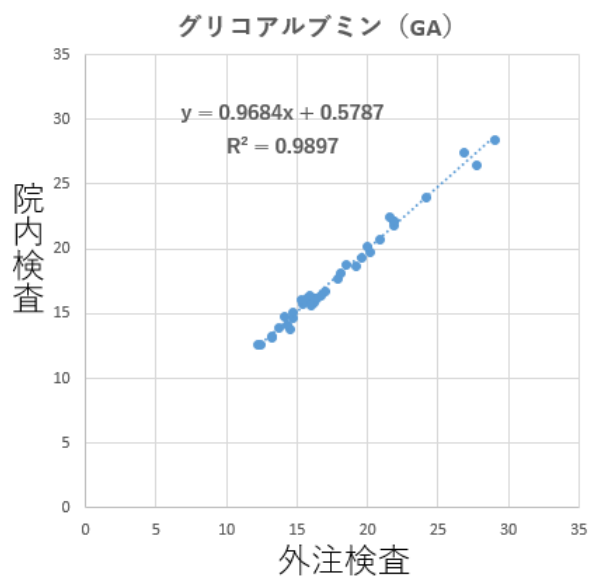

検体番号	外注	院内	検体番号	外注	院内
1	12.2	12.59	20	16.7	16.43
2	12.3	12.62	21	17.0	16.67
3	13.2	13.19	22	17.9	17.72
4	13.1	13.25	23	18.1	18.11
5	14.5	13.79	24	19.2	18.71
6	13.7	13.91	25	18.5	18.79
7	14.2	14.09	26	19.6	19.28
8	14.7	14.65	27	20.2	19.75
9	14.1	14.71	28	20.0	20.22
10	14.7	15.10	29	20.9	20.68
11	16.0	15.63	30	21.8	21.80
12	15.4	15.73	31	21.8	22.10
13	16.1	15.84	32	21.9	22.15
14	16.1	15.97	33	21.6	22.46
15	15.3	16.10	34	24.2	23.98
16	15.7	16.17	35	27.7	26.43
17	16.2	16.18	36	26.9	27.47
18	16.4	16.19	37	29.0	28.44
19	15.9	16.38			

旧分析装置で測定した結果と時系列は継続されませんのでご注意ください。
検査オーダーは既存のオーダーをコピーせず新たにオーダー (セットの組みなおし) してください。

問い合わせは、検査部 サテライト検査室(内線 7409)までお願いします。