

2018年4月27日

診療科長 医局長  
病棟医長 外来医長  
中央診療施設副部長  
看護部長 看護師長  
事務部長 殿

検査部 サテライト検査室  
生化学検査部門

## 検査部回報 No. 9

### 採血管へのラベル貼付について

平素より検査業務にご協力いただき、ありがとうございます。標記の件についてお知らせします。

採血管に貼っていただくラベルですが、ラベルの位置が上すぎたり、下すぎたり、斜めに貼っている事例が多く見受けられます(下図2参照)。このような貼り方を行うと分析装置に搭載する際にエラーとなり、再度ラベルを貼りなおす必要があります。そのため、検査結果を報告するまでに時間が多く必要となり、検査結果遅延の要因の一つとなっております。

採血管にラベルを貼り付ける際には下図1に示す位置(採血管上部から1 cm程離れた位置にラベルを縦に真っすぐ貼る)に貼り付けていただきますようお願い致します。

スムーズな検査業務にご協力の程、宜しくお願い致します。

## <良い例>




- 採血管上部から 1 cm 程度離れた位置に貼る。  
(採血管の真ん中辺りに縦に真っすぐ貼る。)

図 1 : 採血管に貼り付けたラベルの位置

## <悪い例>



✗ ラベルが上すぎる

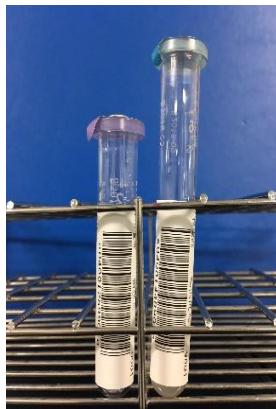

✗ ラベルが下すぎる



✗ ラベルが斜めになっている

図 2 : 採血管に貼り付けたラベルの位置不良例

問い合わせは、検査部 サテライト検査室（内線 7409、7411）までお願いします。