

2026 年 8 月 12 日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長
看護部長 看護師長
事務部長 殿

検査部 サテライト検査室
（生化学）

検査部回報 2026-No.28

ヒドロキシカルバミド使用中のグルコース測定への 影響について

日頃より臨床検査業務へのご協力ありがとうございます。

厚生労働省の医薬安発 0106 第 1 号「血糖測定器等に係る添付文書の自主点検等について」より、ヒドロキシカルバミドを有効成分とする医薬品（商品名：ハイドレア）を服用している場合、グルコース測定結果が実際の値より高い（偽高値）を示す可能性があることについて注意喚起がありました。

当院採用のグルコース測定器における影響の有無について、メーカーへの照会を行いましたので、下記ご参照ください。

<グルコース分析装置（検査部）>

測定方法	測定結果への影響
ヘキソキナーゼ・G-6- PDH 法（ヘパリン）	なし
GOD 固定化酵素電極法（NaF）	なし

<グルコースモニタシステム、自己検査用グルコース測定器等>

製品名	測定結果への影響
ワンタッチベリオビュー	なし
メディセーフフィットスマイル	なし
Free style リブレ 2	なし
Dexcom G7 CGM システム	偽高値の可能性あり
ガーディアン™ 4 スマート CGM システム	偽高値の可能性あり

お問い合わせは、検査部 サテライト検査室（内線 7409）までお願いします。