

顧客 1	長崎大学病院
顧客 2	
所在地	坂本1-7-1
郵便番号 市区町村	852-8102 長崎市
レポートステータス	完了
部署	
検査室	
パーツ番号	10849579
シリアル番号	69536
作業番号	670000697334
技術 ID 番号	1000271633-MR003
装置・ユニット名	MAGNETOM Avanto fit Upgrade(NX)
装置 ID 番号	732-183602

システムの状態

システムは正常です。

システム操作上の影響はありませんが、システムに軽微な問題があり予防措置を行う必要があります。

システムが正常でないため、システムを使用する前に適正な措置を行う必要があります。

- Siemens Healthineers
署名

三浦里仁

日付 21.11.2025
名前 里仁三浦

- 顧客担当者
署名

日付 21.11.2025
名前 N.A.

備考

- 備考

サービスプロバイダ

名前	シーメンスヘルスケア株式会社
所在地	東京都品川区大崎1丁目11番1号 ゲートシティ大崎ウエストタワー
郵便番号 市区町村	〒141-8644 東京都

略語

S	安全性
Q	品質
P	ソフトウェア
T	時刻/時間
(-)	スタンダード

2 メンテナンス手順

2.1 コンピュータ MRC (MRAWP) - MRSC (MRWP)

- コンピュータのクリーニング

● ○ ○

2.2 TFTモニター (Software Numaris 4)

2.2.2 点検

- TFTモニターの点検

● ○ ○

2.3 TFTモニター (Software Numaris 10)

2.3.2 点検

- TFTモニターの点検

● ○ ○

2.4 バキュームポンプ (コンフォートキット オプション)

- バキュームポンプフィルターの交換 (2年ごと)

日付

13-Sep-2024

● ○ ○

2.5 グラジエントフィルター

- グラジエントフィルターのファンの点検

● ○ ○

2.6 冷却

- 冷却システム - 一般点検

● ○ ○

2.7 SEP (オプション)

- SEPの水回路の点検

● ○ ○

2.8 マグネットシステム

2.8.1 コールドヘッド

- コールドヘッドを監視している (必要に応じてコールドヘッドを交換)
- コールドヘッドを交換している (コールドヘッドを監視しない場合は24ヵ月ごとに交換)

日付

N.A.

● ○ ○

○ ○ ●

- 使用開始日

日付

N.A.

○ ○ ●

- 最終交換日

日付

05-Nov-2023

● ○ ○

2.8.2 吸着器

- 吸着器の交換 (F70、3年ごと)

日付

27-Sep-2023

● ○ ○

2.9 患者テーブル

2.9.1 患者テーブルの油圧システム

- 患者テーブルの油圧システムの点検

● ○ ○

2.9.2 オプションのドッキングテーブル；トッキングステーション

- ドッキングステーションの点検（ドッキングテーブルのみ）

○ ○ ●

2.10 RF室ドア

2.10.1 ドア

- RF室ドアの点検

● ○ ○

2.11 ソフトウェア

2.11.1 ディレクトリのクリーンアップ（Numaris 4システムのみ）

- P MR保存ログファイルの削除

○ ○ ●

2.11.2 施設固有のデータ

- P 施設固有のデータの保存

● ○ ○

2.12 オプション：Combi Dockable Table

2.12.1 オプションのCombi Dockable Table；油圧システム

- オプションのCombi Dockable Table；油圧システムの点検

○ ○ ●

2.12.2 オプションのCombi Dockable Table；トッキングステーション

- オプションのCombi Dockable Table；ドッキングステーションの点検

○ ○ ●