

MAGNETOM Aera / Skyra
Maintenance Report
Preventive Maintenance

顧客 1	長崎大学病院
顧客 2	---
所在地	坂本1-7-1
郵便番号 市区町村	852-8102 長崎市
レポートステータス	完了
部署	---
検査室	---
パーツ番号	10432915
シリアル番号	45650
作業番号	728201194149
装置 ID 番号	1000271633-MR002
装置・ユニット名	MAGNETOM Skyra
技術 ID 番号	732-155895

システムの状態

システムは正常です。

システム操作上の影響はありませんが、システムに軽微な問題があり予防措置を行う必要があります。

システムが正常でないため、システムを使用する前に適正な措置を行う必要があります。

- Siemens Healthineers
署名

三浦 里仁

日付	28.06.2025
名前	里仁 三浦

- 顧客担当者
署名

--

日付	28.06.2025
名前	N.A.

備考

- 備考

--

サービスプロバイダ

名前	シーメンスヘルスケア株式会社
所在地	東京都品川区大崎1丁目11番1号 ゲートシティ大崎ウエストタワー
郵便番号 市区町村	〒141-8644 東京都

略語

S	安全性
Q	品質
P	ソフトウェア
T	時刻/時間
(-)	スタンダード

2 メンテナンス手順

2.1 コンピュータ MRC (MRAWP) - MRSC (MRWP)

- コンピュータのクリーニング

● ○ ○

2.2 TFTモニター (Software Numaris 4)

2.2.2 点検

- TFTモニターの点検

● ○ ○

2.3 TFTモニター (Software Numaris 10)

2.3.2 点検

- TFTモニターの点検

○ ○ ●

2.4 バキュームポンプ (コンフォートキット オプション)

- バキュームポンプフィルターの交換 (2年ごと)

● ○ ○

日付

22-Mar-2024

2.5 グラジエントフィルター

- グラジエントフィルターのファンの点検

● ○ ○

2.6 冷却

- 冷却システム - 一般点検

● ○ ○

2.7 SEP (オプション)

- SEPの水回路の点検

● ○ ○

2.8 マグネットシステム

2.8.1 コールドヘッド

- コールドヘッドを監視している (必要に応じてコールドヘッドを交換)
- コールドヘッドを交換している (コールドヘッドを監視しない場合は24ヵ月ごとに交換)

● ○ ○

● ○ ○

日付

28-Aug-2021

- 使用開始日

○ ○ ●

日付

N/A

- 最終交換日

● ○ ○

日付

28-Aug-2021

2.8.2 吸着器

- 吸着器の交換 (F70、3年ごと)

● ○ ○

日付

28-Mar-2023

2.9 患者テーブル

2.9.1 患者テーブルの油圧システム

- 患者テーブルの油圧システムの点検

● ○ ○

2.9.2 オプションのドッキングテーブル：ドッキングステーション

- ドッキングステーションの点検（ドッキングテーブルのみ）

● ○ ○

2.10 RF室ドア

2.10.1 ドア

- RF室ドアの点検

● ○ ○

2.11 ソフトウェア（Numaris 4）

2.11.1 ディレクトリのクリーンアップ（Numaris 4システムのみ）

- P MR保存ログファイルの削除

● ○ ○

2.11.2 施設固有のデータ

- P 施設固有のデータの保存

● ○ ○

2.12 オプション：Combi Dockable Table

2.12.1 オプションのCombi Dockable Table：油圧システム

- オプションのCombi Dockable Table：油圧システムの点検

○ ○ ●

2.12.2 オプションのCombi Dockable Table：ドッキングステーション

- オプションのCombi Dockable Table：ドッキングステーションの点検

○ ○ ●

2.13 モバイルシステム - メンテナンス

2.13.1 ShockLog 298

2.13.1.6 ShockLog 298データのダウンロード

- ShockLog 298データのダウンロード

○ ○ ●

2.13.1.7 ShockLog 298 のバッテリーの交換

- ShockLog 298 のバッテリーの交換

○ ○ ●