



顧客情報

お客様: 長崎大学病院 様
契約番号: MS0846-20200820-010

装置情報

システムID: EM0611 Serial No.: --
製品名: 3-OT SIGNA ARCHITECT 128CH
Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 17004936 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: MAKITA SEIGI WO Number: WO-18553553 WO Type: Field Service
Tube/Slice Count: --
現象: 定期点検scheduleC
作業内容: 定期点検scheduleC作業を実施いたしました。
詳細につきましては別紙「定期点検整備記録簿」に記載しておりますのでご確認ください。
動作確認: 作業後、ファントムテストスキャンにて正常に撮影動作可能であることを確認いたしました。

作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
MAKITA SEIGI	Planned Maintenance	2026 Apr 17 17:00	2026 Apr 17 22:00	05:00

パーツ

RRN	Product ID	Product Description	Qty
412549472	5199490	Battery Pack Asm, MRU2006	1
412546770	5264701	Deionization Filter Cartridges Kit	1

作業担当者:

お客様サイン:

牧田

佐々木

作業者名:

お客様:

MAKITA SEIGI

日時:

日時:

17 Apr 2026 22:29

17 Apr 2026 22:33

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

認定保守代理店

日信電子サービス株式会社

[DSF ePM Checklist] MR 3.0T Architect, 750/750Wおよび1.5T 450/450W, Artist/Artist EVO (DV)

説明と関連資料

DSF ePMサービスマニュアル点検手順のリファレンス

SIMS点検の手順とステップについては、以下のサービスマニュアル/説明書を参照：

- MR Discovery MR450 1.5T Service Methods; DIR 5690020-8EN
- MR Optima MR450W BASE 1.5T Service Methods; DIR 5690010-8EN
- MR Optima MR450W GEM 1.5T and Signa Artist-T 1.5T Service Methods; DIR 5690013-8EN
- MR Signa Artist 1.5T Service Methods; DIR 5690016-8EN or SIS DOC # BBBSC0133
- MR Signa Artist Evo 1.5T Service Methods; DIR 5884920-8EN
- MR Discovery MR750 3.0T Service Methods; DIR 5690007-8EN
- MR Discovery MR750W GEM 3.0T and Signa Architect-T 3.0T Service Methods; DIR 5690000-8EN
- MR Signa Architect 3.0T Service Methods; DIR 5690003-8EN or SIS DOC # BBBSC0042

DV プラットフォーム製品の計画/予防保全（PM または点検）計画に関する追加情報は、技術報告書/サービス注意事項（SN）DOC2258200 で確認できます。

SIMSのサービス情報セット（SIS）ドキュメントを使用して製品点検のスケジュールと手順を見つける手順：

- (a) SIMS 「Modality」 フィールドで「MR」を選択し、
- (b) 「Product Name」フィールドで製品名を選択します。例：「MR SIGNA Architect」または「MR SIGNA Artist」
- (c) 「Document Type」フィールドで「Service Manual」を選択し、
- (d) 「SIS Type」フィールドで「Planned Maintenance」を選択し、次に、
- (e) 以下のタイトル（検索を絞り込むに引用符を使用）を「キーワードまたは文書番号を入力」フィールドに正確にタイプ入力します：
 - Schedule A Planned Maintenance
 - Schedule B Planned Maintenance
 - Schedule C Planned Maintenance
 - Schedule D Planned Maintenance
 - Schedule 1 Warranty Planned Maintenance
 - Schedule 2 Warranty Planned Maintenance

DSF ePM 手順/ワークフロー

- 1) お客様名、Case No.、システム ID、装置名称、国名、開始日（点検開始日）を入力する。
- 2) SR/Work Orderに関連する製品 システムID の設定 HW & SW セクションに記入する。

3) FFA SR (PM Work Order) Workflow Tool、または現場のSystem User InterfaceのePM form header informationから、「ソフトウェアバージョン」(オペレーティングシステム ソフトウェアバージョン)に必要な情報を入力する。

- フィールドフォースオートメーション (FFA): <https://ffa.cloud.ge-healthcare.net/#/ffaHome>

4) 他のブロックに移動するには、「磁場強度 (サイズ)」を選択し、次に「製品タイプ」を選択します。

5) "製品タイプ"を選択すると、Service Direction参照により"Service Manual Doc#"に自動で入力される

6) システムは保証期間内 (設置から12か月間) ですか? に対して「はいいいえ」を選択する。

7) 実行する"Schedule"を選択する。選択肢は「WPM1」または「WPM2」(保証期間内)、および「A、B、C、D」(保証期間外)。

8) DSF ePM チェックリスト HW & SW 設定セクションの設定またはオプションのサービスロジックの質問に回答する。これらの質問は、各スケジュールで施設に適用される点検項目を特定するためのものです。

- テーブルサービスロジック (構成) の質問: 「このシステム ID に次のいずれかの患者テーブルオプションはありますか? - Sentinelte Vanguard Breast MRI テーブルオプション、Signa OR-Compatible テーブルオプション」に「はいいいえ」で回答する。「はい」と回答した場合、すべてのスケジュールにてオンサイト点検が必要になる (OptionのためのRemote点検がありません)。

9) いずれのスケジュールについても、FFA申請書 を上記のリンク を使用して開いてください。Service Manual/Service Note に従って、これらのツールからePM Checklistの最初のPM TaskまたはSite Condition Healthの入力をする。

10) スケジュール B または D のチェックリストの最後にある Service Logic Question (リモートまたはオンサイト方式の決定)を確認する。最後の質問に(「はい」または「いいえ」で) 回答します。接続性または FFA のバックオフィスデータがあり、すべてのリモートデジタルチェックにPASSしましたか? すべてにPASS (緑色) している場合、スケジュールをリモート方式で完了できます。そうでない場合は、オンサイトが必要となります。

11) 点検結果をお客様に電話で報告します。リモート点検の場合は、お客様にオンサイト訪問が不要である旨を報告し (お客様の他の要求や修理 (CR) が無いことが前提)、訪問作業をキャンセルします。オンサイト方式が必要な場合 (チェックリストがリモート分析で完了しない、コンディションの健全性の項目または顧客項目の注意が必要)、追加の訪問活動が必要となります。

12) いずれかの方法で点検が完了したら、DSF ePMをService Forms Repositoryに保存し、サービス記録 (SR) に接続して、SRを閉じます。

お客様とサービス情報

お客様名

長崎大学病院 御中

サービス記録#:

17004936

システム番号/シリアル番号

EM0611

お客様機器名称:

NA

国

JAPAN-JA

開始日

2026-04-17

HWとSWの設定

現在のシステムソフトウェアバージョン:

DV28.0_R06_2126.a

モダリティ

MR

磁場強度 (サイズ):

製品タイプ:

3.0T ▼

SIGNA Architect ▼

システムは保証期間内（設置から12か月間）ですか？

いいえ ▼

スケジュール：

C ▼

このシステム ID に次のいずれかの患者テーブルオプションはありますか？ – Lite Patient Transport テーブルオプション、Sentinelle Vanguard Breast MRI テーブルオプション、Signa OR-Compatible テーブルオプション

はい ▼

施設またはシステムに Sentinelle Vanguard Breast MRI Table が装備されていますか？

いいえ ▼

施設またはシステムに Signa OR-Compatible Table が装備されていますか？

いいえ ▼

☒ スケジュール C

HWとSWの設定

施設またはシステムにリモート MRU が設置されていますか？

いいえ ▼

施設またはシステムには、8KW の MNS キャビネットアンプオプションが設置されていますか？

いいえ ▼

この施設またはシステムには MNS キャビネット（UPM）オプションが設置されていますか？

いいえ ▼

施設またはシステムには、CPC オプション付きの MNS キャビネットが設置されていますか？

いいえ ▼

安全に関わるソフトウェアバージョンの確認

PM Check

コメント

システムにインストールされているアプリケーションソフトウェアバージョンを記録する。

DV28.0_R06_2126.a

システムにインストールされているサービスパック番号を記録する。

None

注: FFA または Spotfire Digital PM ツールを使って、合格/不合格を判定してください。Back Office データがツールと連動しない場合は、Engineering SW Matrix を使って手動で合格/不合格を判定します。オンラインドキュメントライブラリから DOC1667089 (SW Matrix)にアクセスしてください。

PM Check

コメント

MR SW マトリクスからアプリケーションソフトウェア Rev を記録する。

DV28.0_R06_2126.a

該当するアプリケーションソフトウェアのFMIタイプは「Safety」ですか？

☐ はい ☒ いいえ

PM Check

コメント

MR SW マトリクスから最低限のサービスパックを記録（または「なし」と記録する）。

DV28.0_R06_2126.a.PA

MR SWマトリクス上で要求されているSafetyサービスパックはありますか？

☐ はい ☒ いいえ

交換部品 / 消耗部品

注: 交換を予定している場合、コメント欄に部品毎にSR#を記入してください。

点検項目	サブシステム	交換間隔	設置または最終交換日	結果	コメント
 MRU年次サービス チェックの実施 (MRU、ERU、またはEDU PMテスト マトリクス) 交換する必要のある 部品 バッテリーパックア センブリ、 MRU2006 P/N 5199490 (6V 電池)	マグネット	3 年	2026-04-17	交換済み ☒	交換実施

システムの状態確認 & OW トリガーレビュー項目（カスタマーレビュー）

点検項目	BOM PCM サブコンポーネント	テストの 目的	リファレンス/ジョブカード	結果	コメント
------	----------------------	------------	---------------	----	------

システムの状態確認 (カ スタマーレビュー)	イメージ品 質	Site Condition Health	「手順と参照資料」の項を 参照	合格 v	
---------------------------	------------	-----------------------------	--------------------	------	--

コアシステム項目

点検項目	BOM PCM サブ コンポーネント	テストの目的	リファレンス/ジョブカー ド	結果	コメント
緊急排気口の確認	施設	マグネット ルー ム テスト	「手順と参照資料」の項 を参照	合格 v	
FPUフィルターの 洗浄/ダートセパレ ーターのフラッシ ング	冷却システム	冷却キャビネッ ト (ICCまたは pICC)	「手順と参照資料」の項 を参照	合格 v	
GC または GCU 冷 却剤の脱イオン化 とフィルタリング 注意： 脱イオン化/フィル タリング設定後、 並列タスクを完了 する (サービスマニユ アルを参照)	冷却システム	冷却キャビネッ ト (HEC、ICC、 またはpICC)	「手順と参照資料」の項 を参照	合格 v	
PE または CCU 冷 却剤の脱イオン化 とフィルタリング	冷却システム	冷却キャビネッ ト (HEC、ICC、 またはpICC)	「手順と参照資料」の項 を参照	合格 v	
HECの水量確認	冷却システム	冷却キャビネッ ト (HEC、ICC、 またはpICC)	「手順と参照資料」の項 を参照	合格 v	
点検項目	BOM PCM サブ コンポーネント	テストの目的	リファレンス/ジョブカー ド	結果	コメント
患者テーブルの動 作確認	Patient Handling	Patient Handling	TB DOC3177272を参照	合格 v	
クレードル/テーブ ルリリースブロッ ク調整/クレードル リリース機能	Patient Handling	Patient Handling	「手順と参照資料」の項 を参照	合格 v	
LVShim –Gradshim	イメージ品質	システム性能	「手順と参照資料」の項 を参照	合格 v	

EPI White Pixel Test (PM Mode)	イメージ品質	システム性能	「手順と参照資料」の項を参照	合格	v	
System Performance Test (SPT) (PM Mode) 注意： (1) SPT には約60分かかります。 (2) SPTの前にEPIWP と LVShim Cals を実施します (3) 並行作業を完了します（サービスマニュアルを参照）	イメージ品質	システム性能	「手順と参照資料」の項を参照	合格	v	
PM Check	システム性能	システム性能	「手順と参照資料」の項を参照	合格	v	
ECGリード設置、機能チェック/ Cardiac Gating Cable	システム性能	マグネット ルーム テスト	「手順と参照資料」の項を参照	合格	v	
ボディコイルエアフローフィルターの清掃と交換	ブローワー	マグネット ルーム テスト	「手順と参照資料」の項を参照	合格	v	
MDPの電源とアース接続およびバッテリー交換ラベル確認 (ラベル P/N 5661793 を使用します)	MDP	ラベル確認	「手順と参照資料」の項を参照	未完了	v	後日交換予定
PDU 電源/接地の接続確認	PDU	PDUテスト	「手順と参照資料」の項を参照	合格	v	
ワークステーションとホストコンピュータのフロントエアフィルターの清掃	GOC	オペレーターコンソール	「手順と参照資料」の項を参照	合格	v	
UPM機能チェック (H&B)	RF	イメージ品質	「手順と参照資料」の項を参照	合格	v	
Save Info	GOC	コンピュータ テスト	「手順と参照資料」の項を参照	合格	v	

患者ブローワーエア フィルターの清掃 と交換	ブローワー	マグネット ルー ム テスト	「手順と参照資料」の項 を参照	合格	v	
P-portコネクタの 清掃グリスアップ	コイル	コイルテスト	「手順と参照資料」の項 を参照	合格	v	
PGRキャビネット のフィルタの清掃	PGR	PGRキャビネット の点検	「手順と参照資料」の項 を参照	合格	v	

システムオプション項目

Equipment Operation Check (EOC)：MRU機能チェック

点検項目	BOM PCM サブ コンポーネント	テストの目的	リファレンス/ジョブカー ド	結果	コメント
MRU バッテリー ー/LEDサービスチ ェックの実施 注記: 1) 従来の四半期チ ェック -- MRU テ ストマトリクスを 参照してくださ い。 2) 訪問点検時のみ 実施します。 3) MRUバッテリー ラベルチェックを 含みます。	マグネット	安全性	「手順と参照資料」の項 を参照 SIS CQY0016 DOC1483832	合格	v

コメント・ツール・添付ファイル

コメント 文字 2000

使用ツール

ツール詳細	シリアル番号	バーコード	校正期限日
電子記録に登録			
ツール詳細	シリアル番号	バーコード	校正期限日
DVM(FLUKE/87VSi)	41590212	NA	2026-09-30

添付ファイル

ファイル選択 選択されていません

Attached Documents :

GE HealthCare担当者

作業者数

1

v

名前:

牧田正義

SSO # :

503059510

サービス記録#

17004936

完了日

2026-04-17

お客様署名

☐ Yes ☒ Not Required

Document Number: BBK0714 Revision: 11