

解析付心電計【FCP-7541】定期点検報告書

1/2

保守契約：☒有 ☐総括、☒通常、☐無

保守契約番号(報告書管理番号)：

21037(008877)

施設名 長崎大学病院 様	機器名 or 一般名称 解析付心電計	点検日 2025年02月14日	点検検収日 2025年02月14日
設置場所 生理検査室心電図室2	型式名 or 型番 FCP-7541	次回点検 2025年02月	ご署名 森 永 上
機器管理番号(施設)	製造販売業者 フクダ電子株式会社	製造番号 50006582	購入年月日 2014年09月29日

項目番号	点検項目	判定	処理
1	清浄状態、清掃		
1	清浄状態確認(汚染汚濁無し、或いは措置)	○	
2	清掃(汚れ等は事前清掃実施)	○	
2	外観、接続状態		
1	外観(安全、機能に問題の傷、変形等無し)	○	否
2	銘板・パネル(剥がれ無し)	○	否
3	キー(破損無し、スムーズ動作)	○	否
4	電源コード/誘導コード(傷等無し、接続スムーズ)	○	否
5	エーカークリップ/胸部電極(傷等無し、接続スムーズ)	○	否
6	記録紙(装填状態、予備記録紙)	○	否
7	トリ/コードハンガー(取付状態)	○	否
8	取扱説明書/添付文書(所定位置に保管)	○	否
9	ヒューズ(仕様通りのものの装着)	○	否
3	動作点検(注 MM:メンテナンスモード、t:テストの意)		
1	電源 入/切 (AC、バッテリー 共に動作正常)	○	否
2	時計設定(正しい時刻が設定されているか)	○	否
3	記録搬送状態(MM トータル記録t:スムーズ、異常音無)	○	否
4	記録速度(MM トータル記録t:242.5~257.5mm内)	○	否
5	印字状態(MM トータル記録t:カスレ、ドット抜け無し)	○	否
6	キー・LED(MM キー・LED t:動作確認)	○	否
7	表示(MM LCD t:ドット抜け無、諧調正常)	○	否
8	スピーカ(ブザー)(MMスピーカ(ブザー)t:音確認)	○	否
9	CRT(CRTテスト 外部モニタ表示確認)	良	否 /
10	ステータス(MM ステータスt:各種ステータス異常無し)	○	否
11	メモリ(MM メモリテスト:エラー無し)	○	否
12	IC/CFカード(MM IC/CFカードt:エラー無し)	○	否
13	フロッピーディスク(MM フロッピーディスクt:エラー無し)	良	否 /
14	シリアルポート(MM シリアルポートt:エラー無し)	○	否
15	LANポート(MM LANポートt:エラー無し)	○	否
16	アナログI/F(MM アナログI/F t:エラー無し)	良	否 /

項目番号	点検項目	判定	処理
3	動作点検(注 MM:メンテナンスモード、t:テストの意)(つづき)		
17	タッチパネル(MM タッチパネルt:エラー無し)	良	否 /
4	電気的性能・特性		
1	感度		
	感度×1 (9.8~10.2)	計測値	10.0 mm ○ 否
	感度×1/2(4.75~5.25)	計測値	5.05 mm ○ 否
	感度×1/4(2.375~2.625)	計測値	2.505 mm ○ 否
	感度×2 (19.0~21.0)	計測値	20.0 mm ○ 否
2	時定数(3.2~3.84秒 or 0.05Hzで70%以上のF特)	良	否
3	周波数特性		
	0.5(or0.67)Hz(90~105%)	計測値	95 % ○ 否
	40Hz(90~105%)	計測値	95 % ○ 否
	100Hz(80~105%)	計測値	100 % ○ 否
5	定期交換部品の点検		
1	定期交換部品の確認 取扱参照	良	否
6	バッテリーの充電 (バッテリー搭載機器のみ)		
1	作業の終了時にバッテリーを充電する	○	
7	電気的安全性		
	注)以下AC、DC計測で、ESA180使用の場合 mix選択記載		
1	接地漏れ (NC:0.5mA以下)	計測値	0.025 mA ○ 否
2	接地漏れ (SFC:1.0mA以下)	計測値	0.051 mA ○ 否
3	外装漏れ (NC:0.1mA以下)	計測値	0.001 mA ○ 否
4	外装漏れ (SFC:0.5mA以下)	計測値	0.013 mA ○ 否
5	患者漏れ電流-I NC:0.01mA以下		
	AC・mix	計測値	0.029 mA ○ 否
	DC	計測値	0.001 mA ○ 否
6	患者漏れ電流-I SFC:0.05mA以下		
	AC・mix	計測値	0.024 mA ○ 否
	DC	計測値	0.001 mA ○ 否

次ページへ続く

※ 済および良否判定結果に○を付けること(対象外の項目は斜線で閉じること)

※ 安全・機能の項目で異常が発見された場合、またはエラーメッセージ等が表示された場合、速やかに使用を中止し、フクダ電子営業員までご連絡ください

使用期間：☒耐用期間内 ☐耐用期間以上

注 未納オプション機能の点検は、省略可

処理欄の記号説明	
RP	部品交換
/	対象外・未使用
A	校正・調整
C	清掃
R	修理

点検の結果、次の通りご報告いたします	[交換部品]
総合判定	
☒ 異常ありません	
☐ 修理等対応が必要です	
☐ 使用を中止して、緊急に修理等が必要です	
[故障及び修理内容]	
[その他情報]	

受託会社	フクダ電子西部北販売株式会社長崎営業所
点検者	相良 俊孝
受託責任者(医療機器修理責任技術者)	森永 峰司
作業区分	☒ 出張 ☐ 引取 ☐ 休日 ☐ 夜間

2/2

[illegible][illegible]

注 未納オプション機能の点検は、省略可

処理欄の記号説明										
RP	部品交換	/	対象外・未使用	A	校正・調整	C	清掃	R	修理	

