

解析付心電計【FCP-7541】定期点検報告書

保守契約：有 [総括、通常]、無

点検管理番号(報告書管理番号)：

23157(014133)

施設名 長崎大学病院 様	機器名 or 一般名称 解析付心電計	点検日 2026年02月26日	点検検収日 2026年02月26日
設置場所 生理検査室心電図室3	型式名 or 型番 FCP-7541	次回点検	ご署名 高橋
機器管理番号(施設)	製造販売業者 フクダ電子株式会社	製造番号 50001355	購入年月日 2008年12月26日

項目番号	点検項目	判定	処理
1 清浄状態、清掃			
1	清浄状態確認(汚染汚濁無し、或いは措置)	◎	
2	清掃(汚れ等は事前清掃実施)	◎	
2 外観、接続状態			
1	外観(安全、機能に問題の傷、変形等無し)	◎	否
2	銘板・パネル(剥がれ無し)	◎	否
3	キー(破損無し、スムーズ動作)	◎	否
4	電源コード/誘導コード(傷等無し、接続スムーズ)	◎	否
5	エーカークリップ/胸部電極(傷等無し、接続スムーズ)	◎	否
6	記録紙(装填状態、予備記録紙)	◎	否
7	トリ/コードハンガー(取付状態)	◎	否
8	取扱説明書/添付文書(所定位置に保管)	◎	否
9	ヒューズ(仕様通りのものの装着)	◎	否
3 動作点検(注 MM:メンテナンスモード、t:テストの意)			
1	電源 入/切 (AC、バッテリー 共に動作正常)	◎	否
2	時計設定(正しい時刻が設定されているか)	◎	否
3	記録搬送状態(MM トータル記録t:スムーズ、異常音無)	◎	否
4	記録速度(MM トータル記録t: 242.5~257.5mm内)	◎	否
5	印字状態(MM トータル記録t:カスレ、ドット抜け無し)	◎	否
6	キー・LED(MM キー・LED t:動作確認)	◎	否
7	表示(MM LCD t:ドット抜け無、諧調正常)	◎	否
8	スピーカ(フザー)(MMスピーカ(フザー)t:音確認)	◎	否
9	CRT(CRTテスト 外部モニタ表示確認)	良	否 /
10	ステータス(MM ステータスt:各種ステータス異常無し)	◎	否
11	メモリ(MM メモリテスト:エラー無し)	◎	否
12	IC/CFカード(MM IC/CFカードt:エラー無し)	◎	否
13	フロッピーディスク(MM フロッピーディスクt:エラー無し)	良	否 /
14	シリアルポート(MM シリアルポートt:エラー無し)	◎	否
15	LANポート(MM LANポートt:エラー無し)	◎	否
16	アナログI/F(MM アナログI/F t:エラー無し)	良	否 /

項目番号	点検項目	判定	処理
3 動作点検(注 MM:メンテナンスモード、t:テストの意)(つづき)			
17	タッチパネル(MM タッチパネルt:エラー無し)	◎	否
4 電気的性能・特性			
1 感度			
	感度×1 (9.8~10.2)	計測値	10.1 mm ◎ 否
	感度×1/2(4.75~5.25)	計測値	5.05 mm ◎ 否
	感度×1/4(2.375~2.625)	計測値	2.500 mm ◎ 否
	感度×2 (19.0~21.0)	計測値	20.5 mm ◎ 否
2	時定数(3.2~3.84秒 or 0.05Hzで70%以上のF特)	◎	否
3 周波数特性			
	0.5(or0.67)Hz(90~105%)	計測値	90 % ◎ 否
	40Hz(90~105%)	計測値	100 % ◎ 否
	100Hz(80~105%)	計測値	100 % ◎ 否
5 定期交換部品の点検			
1	定期交換部品の確認 取説参照	◎	否
6 バッテリーの充電 (バッテリー搭載機器のみ)			
1	作業の終了時にバッテリーを充電する	◎	
7 電気的安全性			
注)以下AC、DC計測で、ESA180使用の場合 mix選択記載			
1	接地漏れ (NC:0.5mA以下)	計測値	48.100 μA ◎ 否
2	接地漏れ (SFC:1.0mA以下)	計測値	90.300 μA ◎ 否
3	外装漏れ (NC:0.1mA以下)	計測値	1.000 μA ◎ 否
4	外装漏れ (SFC:0.5mA以下)	計測値	1.000 μA ◎ 否
5 患者漏れ電流-I NC:0.01mA以下			
	AC・mix	計測値	1.000 μA ◎ 否
	DC	計測値	1.000 μA ◎ 否
6 患者漏れ電流-I SFC:0.05mA以下			
	AC・mix	計測値	1.000 μA ◎ 否
	DC	計測値	1.000 μA ◎ 否

次ページへ続く

※ 済および良否判定結果に○を付けること (対象外の項目は斜線で閉じること)

※ 安全・機能の項目で異常が発見された場合、またはエラーメッセージ等が表示された場合、速やかに使用を中止し、フクダ電子営業員までご連絡ください

使用期間：耐用期間内 耐用期間以上

注 未納オプション機能の点検は、省略可

処理欄の記号説明										
RP	部品交換	/	対象外・未使用	A	校正・調整	C	清掃	R	修理	

<p>点検の結果、次の通りご報告いたします [交換部品]</p> <p>総合判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 異常ありません</p> <p><input type="checkbox"/> 修理等対応が必要です</p> <p><input type="checkbox"/> 使用を中止して、緊急に修理等が必要です</p> <p>[故障及び修理内容]</p> <p>保守点検実施、正常動作を確認し、精度確認を致しました。</p> <p>[その他情報]</p>	<p>受託会社</p> <p>フクダ電子西部北販売株式会社長崎営業所</p> <p>点検者</p> <p>相良 俊孝</p> <p>受託責任者(医療機器修理責任技術者)</p> <p>森永 峰司</p> <p>作業区分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 出張 <input type="checkbox"/> 引取</p> <p><input type="checkbox"/> 休日 <input type="checkbox"/> 夜間</p>
--	--

