

解析付心電計【FCP-7541】定期点検報告書

1/2

保守契約：有 [総括、通常]、無

保守契約番号(報告書管理番号)：

18820(004115)

施設名 長崎大学病院 様	機器名 or 一般名称 解析付心電計	点検日 2024年01月12日	点検回収日 2024年01月12日
設置場所 生理検査室心電図室	型式名 or 型番 FCP-7541	次回点検 2025年01月	ご署名 川波
機器管理番号(施設) M14060000000035	製造販売業者 フクダ電子株式会社	製造番号 50006582	購入年月日 2014年09月29日

項目番号	点検項目	判定	処理
1	清浄状態、清掃		
1	清浄状態確認(汚染汚濁無し、或いは措置)	◎	
2	清掃(汚れ等は事前清掃実施)	◎	
2	外観、接続状態		
1	外観(安全、機能に問題の傷、変形等無し)	◎	否
2	銘板・パネル(剥がれ無し)	◎	否
3	キー(破損無し、スムーズ動作)	◎	否
4	電源コード/誘導コード(傷等無し、接続スムーズ)	◎	否
5	エーサークリップ/胸部電極(傷等無し、接続スムーズ)	◎	否
6	記録紙(装填状態、予備記録紙)	◎	否
7	トローリコードハンガー(取付状態)	◎	否
8	取扱説明書/添付文書(所定位置に保管)	◎	否
9	ヒューズ(仕様通りのものの装着)	◎	否
3	動作点検(注 MM:メンテナンスモード、t:テストの意)		
1	電源 入/切 (AC、バッテリー 共に動作正常)	◎	否
2	時計設定(正しい時刻が設定されているか)	◎	否
3	記録搬送状態(MM トータル記録t:スムーズ、異常音無)	◎	否
4	記録速度(MM トータル記録t:242.5~257.5mm内)	◎	否
5	印字状態(MM トータル記録t:カスレ、ドット抜け無し)	◎	否
6	キー・LED(MM キー・LED t:動作確認)	◎	否
7	表示(MM LCD t:ドット抜け無、諧調正常)	◎	否
8	スピーカ(フザー)(MMスピーカ(フザー)t:音確認)	◎	否
9	CRT(CRTテスト 外部モタ表示確認)	良	否 /
10	ステータス(MM ステータス:各種ステータス異常無し)	◎	否
11	メモリ(MM メモリテスト:エラー無し)	◎	否
12	IC/CFカード(MM IC/CFカードt:エラー無し)	◎	否
13	フロッピーディスク(MM フロッピーディスクt:エラー無し)	良	否 /
14	シリアルポート(MM シリアルポートt:エラー無し)	◎	否
15	LALポート(MM LALポートt:エラー無し)	◎	否
16	アナログI/F(MM アナログI/F t:エラー無し)	良	否 /

項目番号	点検項目	判定	処理
3	動作点検(注 MM:メンテナンスモード、t:テストの意)(つづき)		
17	タッチパネル(MM タッチパネルt:エラー無し)	◎	否
4	電気的性能・特性		
1	感度		
	感度×1 (9.8~10.2)	計測値	10.0 mm ◎ 否
	感度×1/2(4.75~5.25)	計測値	5.00 mm ◎ 否
	感度×1/4(2.375~2.625)	計測値	2.500 mm ◎ 否
	感度×2 (19.0~21.0)	計測値	20.0 mm ◎ 否
2	時定数(3.2~3.84秒 or 0.05Hzで70%以上のF特)	◎	否
3	周波数特性		
	0.5(or0.67)Hz(90~105%)	計測値	100 % ◎ 否
	40Hz(90~105%)	計測値	100 % ◎ 否
	100Hz(80~105%)	計測値	95 % ◎ 否
5	定期交換部品の点検		
1	定期交換部品の確認 取説参照	◎	否
6	バッテリーの充電 (バッテリー搭載機器のみ)		
1	作業の終了時にバッテリーを充電する	◎	
7	電気的安全性		
	注)以下AC、DC計測で、ESA180使用の場合 mix選択記載		
1	接地漏れ (NC:0.5mA以下)	計測値	0.002 mA ◎ 否
2	接地漏れ (SFC:1.0mA以下)	計測値	0.001 mA ◎ 否
3	外装漏れ (NC:0.1mA以下)	計測値	0.012 mA ◎ 否
4	外装漏れ (SFC:0.5mA以下)	計測値	0.023 mA ◎ 否
5	患者漏れ電流-I NC:0.01mA以下		
	AC・mix	計測値	0.004 mA ◎ 否
	DC	計測値	0.001 mA ◎ 否
6	患者漏れ電流-I SFC:0.05mA以下		
	AC・mix	計測値	0.006 mA ◎ 否
	DC	計測値	0.001 mA ◎ 否

次ページへ続く

※ 済および良否判定結果に○を付けること(対象外の項目は斜線で閉じること)

※ 安全・機能の項目で異常が発見された場合、またはエラーメッセージ等が表示された場合、速やかに使用を中止し、フクダ電子営業員までご連絡ください

使用期間：耐用期間内 耐用期間以上

注 未納オプション機能の点検は、省略可

処理欄の記号説明

RP	部品交換	/	対象外・未使用	A	校正・調整	C	清掃	R	修理	
----	------	---	---------	---	-------	---	----	---	----	--

点検の結果、次の通りご報告いたします [交換部品]

総合判定

異常ありません

修理等対応が必要です

使用を中止して、緊急に修理等が必要です

[故障及び修理内容]

[その他情報]

受託会社
フクダ電子西部北販売株式会社長崎営業所

点検者
相良 俊孝

受託責任者(医療機器修理責任技術者)
森永 峰司

作業区分
 出張 引取
 休日 夜間

